



TANTU APHTHAE - GARGARA

120 ml

Ağızdaki aftlar ve küçük yaralar.

Ağrıyı hafifletir.

Hızlı iyileşme sağlar.

6 saate kadar uzun süren etki.

Endikasyonlar

TANTU APHTHAE, ağızda aftların, aftlı ülserlerin, yaygın yaraların, ağız boşluğu tahrişlerinin ve ortodontik aparatlar, sabit veya hareketli protezlerle temas sebebiyle oluşan küçük yaraların tedavisinde kullanılan bir tıbbi cihazdır.

Gargaranın sürekli kullanımı, ağız boşluğunun tamamında, ortodontik aparatlar, sabit ve hareketli protezlerin neden olduğu tekrarlayan yaraların önlenmesine yardımcı olur. Ağız boşluğundaki yaraları yabancı cisimlerle temastan koruyan ve altı saate kadar devam eden "bariyer etkili" bir koruyucu tabaka oluşturarak ağrıyı hızlı bir şekilde azaltır ve daha fazla tahriş riskini önler.

Aftların, aftlı ülserlerin ve yaraların üzerini kaplayarak, dış etkenlerle, kimyasal, mekanik ve termal uyarıcılarla teması kısıtlar ve aftların iyileşme sürecini hızlandırır.

İşlevsel bileşenleri sayesinde yaraların kabuk bağlanmasını sağlar ve iyileşme sürecini hızlandırır. Yanmayı azaltır.

Yetişkinler, 8 yaş ve üzeri çocuklar için uygundur.

Alkol içermez. Yanma yapmaz.

Bileşimi

Bitkisel gliserin, Demirhindi'den elde edilen Xyloglukan, Centella asiatica glikozitleri, Aloe vera (Aloe vera L., özü jeli) 200:1 kuru ekstrakt, Pantenol, Su, Etoksillenmiş hidrojene hint yağı, Hidroksipropil metilselüloz, Sodyum benzoat, Nane esansı yağı, Potasyum sorbat, Sitrik asit.

Dozaj ve kullanım talimatları

Kullanmadan önce ürünü çalkalayınız.

Bir hafta boyunca veya şikayetler bitene kadar, günde 2-3 defa veya ihtiyaca göre daha fazla, tercihen dişleri fırçaladıktan sonra, 10ml ürünü gargara yapınız.

En az 30 saniye boyunca ağızda çalkalayınız.

Ürün kullanıma hazırdır.

Su ilave etmeyiniz. Sürekli olarak 30 günden fazla kullanmayınız.

Ürünü daha etkili hale getirmek için, uyguladıktan sonra en az bir saat yiyecek ve içecek tüketmeyiniz.

Uyarılar

- Kullandıktan sonra şişeyi iyice kapatınız.
- Bileşenlerden birine hassasiyetiniz veya alerjiniz varsa kullanmayınız.
- Ambalajın üzerinde belirtilen son kullanma tarihinden sonra kullanmayınız.
- Çocukların erişemeyeceği yerde saklayınız.
- Ambalajı hasar görmüş ürünleri kullanmayınız.

Son kullanma tarihi, ambalajı açılmamış ve uygun şekilde saklanan ürün için geçerlidir. Işıktan koruyarak, serin ve kuru bir yerde oda sıcaklığında orijinal ambalajında saklayınız. Ambalajda 120 ml'lik bir şişe ve dozajlı ölçek (CE 0373 tıbbi cihaz) bulunur.

TANTU APHTHAE'in mevcut formları:

- **GARGARA:** 120 ml'lik şişe
- **SPREY:** 20 ml'lik şişe
- **JEL:** 8 ml'lik tüp

Revizyon: Aralık 2019

Üretici:

A.C.R.A.F. S.p.A., Viale Amelia, 70 - 00181 ROMA, İtalya

İthalatçı:

Angelini İlaç San. ve Tic. A.Ş.
Levent, Beşiktaş/ İSTANBUL

CE 0477

BRaille TEXT				COLOUR 1	
MOCKUP				COLOUR 2	
Leaflet_TV SOS AFTE COLL 120ml				COLOUR 3	
MOCKUP	PAM VERSION N.08	DIMENSION	FRONT/BACK	COLOUR 4	
DATE	14/10/2020			COLOUR 5	
				COLOUR 6	
This design is 'property' of a.c.i. angelini francesco s.p.a. and must not be delivered or exhibition to another person in original or in copy.					
PRODUCT ARTWORK MANAGEMENT APPROVAL	MARKETING APPROVAL	MARKETING APPROVAL	MARKETING APPROVAL	MARKETING APPROVAL	
	RA APPROVAL	RA APPROVAL	RA APPROVAL	RA APPROVAL	
	ONAYLANDI 2020/10/24 15:21				

mark "/" the box, if approval by the responsible body is not foreseen